
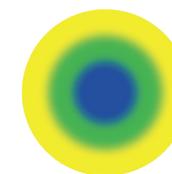
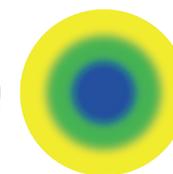
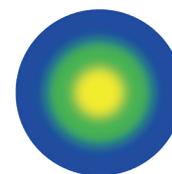
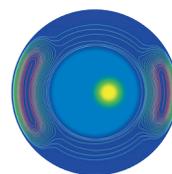
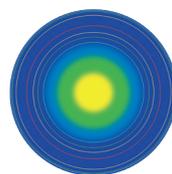
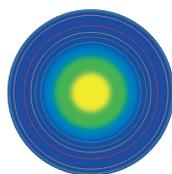


# Übersicht Mehrstärken-Kontaktlinsen von Menicon

## Weiche Linsen

	Miru 1day UpSide multifocal	Miru 1day Flat Pack multifocal	Miru 1 month multifocal + multifocal toric	Menicon Niji multifocal + multifocal toric	Individual Progressive
<b>Eigenschaften</b>	<p><b>Neuro Adaptive Design™:</b> schnelle Adaption durch sanfte Übergänge zwischen den Entfernungen</p> <p><b>Smart Touch™</b> Verpackungstechnologie für besonders einfache Handhabung</p>  		<p><b>Multifokal Dual Balanced Design®:</b> kompromisslos gut, auch bei hohen Additionen</p> <p><b>LOW Design</b> bis Add +2,25 <b>HIGH Design</b> ab Add +2,50 dezentrierte Nahzone</p> <p><b>Neu:</b> Multifokal torisch LOW Design bis Add +2,25</p>	<p><b>Teil-individuell</b></p> <p>Multifokal und multifokal torisch</p> <p>Monatslinse</p> <p>2 Additions-Designs (CN + CD)</p> <p>Großer Lieferbereich</p>	<p><b>Individuell</b></p> <p>Multifokal und multifokal torisch</p> <p>3 und 6 Monate</p> <p>2 Materialien</p> <p>Großer Lieferbereich</p>
<b>Materialien</b>	SiHy	Hy	SiHy	SiHy	SiHy und Soft 72
<b>Design</b>	simultan Zentrum Nähe	simultan Zentrum Nähe	simultan Zentrum Nähe	simultan Zentrum Nähe und Zentrum Ferne	simultan Zentrum Ferne

-  Ferne
-  Nähe
-  Progressionszone

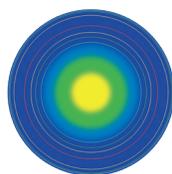

### Nützliche Links:

#### Multifokale Linsen

Informationen, Anpass-Leitfäden, Linsenrechner, Downloads  
[www.menicon.de/professional/multifokale-kontaktlinsen/](http://www.menicon.de/professional/multifokale-kontaktlinsen/)



#### Lernwelt

E-Learnings, Webinare, Inhalte on Demand  
[www.menicon-news.de/gleitsichtkontaktlinsen-130-de](http://www.menicon-news.de/gleitsichtkontaktlinsen-130-de)



## Formstabile Linsen

	Progressive	Progressive+	Progressive Inverse	Menifocal Z	Executive
Eigen-schaften	<b>1. Wahl bei formstabilen Multifokal-Linsen</b> Bei Wunsch nach uneingeschränktem Sehen in allen Entfernungen und Blickrichtungen 90 % erfolgreiche Anpassungen	Zusatzoption bei Wunsch nach größerem Nahbereich Höherer Flächenanteil der Nahzone durch verkürzte Progressionszone	Zusatzoption bei hohem Anspruch an die Sicht im Nahbereich	Konzentrisch alternierend mit sanftem Übergang Bequemes Sehen fern und nah	Alternierend mit Trennkante
Materialien	Z und EX	Z und EX	Z und EX	Z	Z und EX
Design	simultan Zentrum Ferne	simultan Zentrum Ferne	simultan Zentrum Nähe	alternierend Zentrum Ferne	alternierend bifokal



### Erfolgsfaktoren für die Anpassung multifokaler Kontaktlinsen

#### 1. Nutze unsere Menicon Bedarfsanalyse „Mein Sehalltag“

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, und viele Bilder erleichtern das Gespräch. Je mehr Informationen Du über die Sehgewohnheiten Deiner Kunden bekommst, desto zielgerichteter kannst Du beraten!

Zu bestellen (kostenlos) im Menicon Download-Portal.

#### 2. Grundregeln

So viel Plus wie möglich in der Ferne geben!

Die Nähe immer bedarfsgerecht messen:  
**Tipp:** die Addition langsam aufbauen.

Der Stärkenabgleich bei multifokalen Kontaktlinsen erfolgt immer monokular unter binokularen Bedingungen.

#### 3. Sensorischer Dominanztest

Im Wechsel ein sph. Messglas (+0,50 dpt bis 1,00 dpt) vor das rechte bzw. das linke Auge halten. Das Auge, vor dem die Nebelung mehr stört, ist das fern-dominante Auge.



#### 4. Gutes Licht

Die Pupillengrößen haben enormen Einfluss auf die Qualität des Sehens mit multifokalen Kontaktlinsen.

#### Helle Umgebung

- ▶ kleinere Pupillen
- ▶ bessere Tiefenschärfe
- ▶ bessere Ausnutzung der Nahzone bei multifokalen Kontaktlinsen mit der Nähe im Zentrum

Nutze unsere Multifokal-Anpass-Leitfäden mit Tipps und Tricks für erfolgreiche Anpassungen.

